

# FlexPen®



FLEXPEN® UŽIVA  
**POVERENJE**  
MILIONA PACIJENATA

menjamo  
svakodnevne navike  
u dijabetesu





Dobro ujednačiti suspenziju insulina u brizgalici valjanjem FlexPen® brizgalice između dlanova i njenim okretanjem gore dole, na način prikazan na slici. Neophodno je da ovo uradite uvek pre primene insulina, osim u slučaju kada se u brizgalici nalazi bistri insulin.



Zavrните novu NovoFine® iglu na FlexPen®. Skinite oba poklopca igle.



Odaberite željenu dozu insulina okretanjem dugmeta za doziranje u smeru kazaljke na satu. Ukoliko ste odabrali pogrešnu dozu insulina, jednostavno okrenite dugme za doziranje napred ili nazad dok ne odaberete željeni broj jedinica.




Skinite poklopac FlexPen® brizgalice i ubodite iglu u kožu. Ubrizgajte celokupnu dozu insulina pritiskanjem dugmeta za ubrizgavanje do kraja. Nakon ubrizgavanja sačekajte najmanje šest sekundi pre izvlačenja igle iz kože. Pažljivo vratite poklopac na iglu, odvrnite je i uklonite, a poklopac FlexPen®-a vratite na brizgalicu.



Ukoliko je u FlexPen® brizgalici ostalo 12 jedinica ili manje upotrebite novu brizgalicu.



# Mesta i način ubrizgavanja insulina

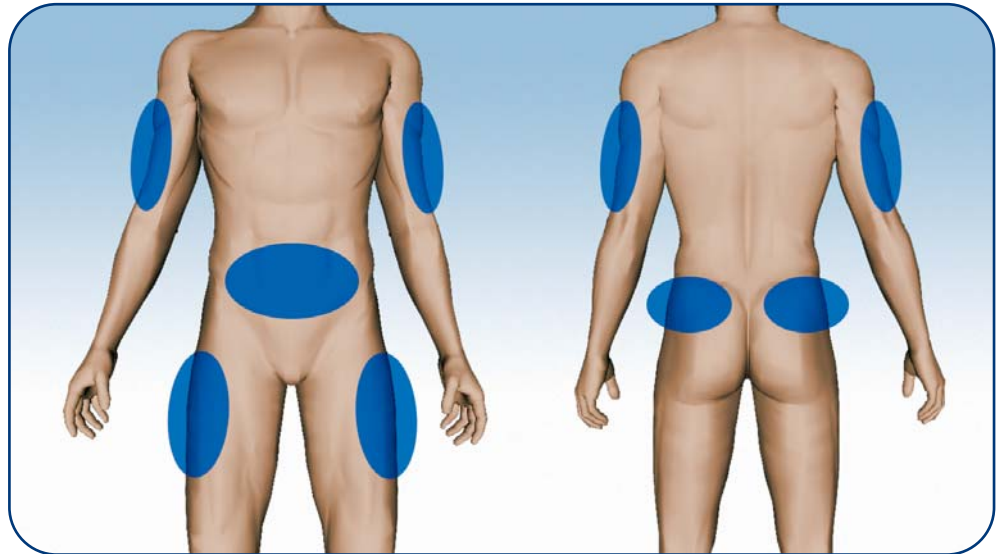


Insulin se ubrizgava u jednu od četiri prikazane oblasti:


1. prednji trbušni zid
2. nadlaktice
3. bedra
4. sedalni predeo

Insulin se uvek ubrizgava u samo jednu oblast tela za koju se pacijent opredelio. Promena oblasti dovodi do razlika u brzini nastupanja i dužini trajanja dejstva insulina.


Pacijent treba da menja mesto i stranu ubrizgavanja insulina u okviru oblasti u koju vrši ubrizgavanje. Stalno ubrizgavanje insulina u isto mesto može dovesti do oštećenja potkožnog tkiva.

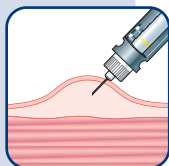

Kod dece i mršavih osoba preporučuje se upotreba igala dužine 6 mm. Igla se ubada pod uglom od 45° u kožni nabor.

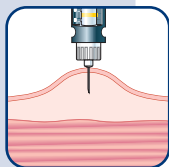

Normalno uhranjene osobe mogu koristiti igle dužine 6 mm ili 8 mm. Igla se ubada pod uglom od 90° u kožni nabor.

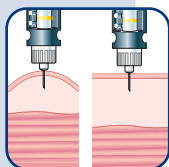

Kod gojaznih osoba upotrebljavaju se igle dužine 8 mm. Igla se ubada pod uglom od 90°:

1. u kožni nabor ili
2. bez kožnog nabora